

IODOSORB[®] DRESSING

Cadexomeer kompres met iodine

STERILE R Gesteriliseerd met gammastraling. Uitsluitend voor éénmalig gebruik. Inhoud niet gebruiken indien de verpakking geopend of beschadigd is of na de op de verpakking gedrukte vervaldatum. Op een droge plaats bewaren (<25°C).

Omschrijving

IODOSORB Dressing is een steriel kompres dat bestaat uit twee laagjes gaas met daartussen een donkerbruine substantie die bestaat uit cadexomeer (kleine korrels van gemodificeerd zetmeel), polyethyleenglycol en jodium. De cadexomeerkorrels zijn biologisch afbreekbaar. IODOSORB Dressing verwijdert overtollig exsudaat en afgestorven weefsel uit de wond en beperkt het aantal bacteriën aan het wondoppervlak. Daarbij vormt het een zachte, vochtige gel.

Indicaties

IODOSORB Dressing is geschikt voor de plaatselijke behandeling van chronisch exsuderende wonden. IODOSORB Dressing kan gebruikt worden bij compressietherapie. IODOSORB Dressing mag gebruikt worden op geïnfecteerde wonden. Raadpleeg uw lokale klinische protocol voor de behandeling van geïnfecteerde wonden.

Contra-indicaties

IODOSORB Dressing mag niet gebruikt worden op droog necrotisch weefsel of bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor jodium of één van de andere bestanddelen van het product. IODOSORB Dressing mag niet gebruikt worden door kinderen van 14 jaar of jonger, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of mensen met schildklieraandoeningen of een verstoorde nierfunctie (bijv. Hashimoto's thyroiditis of niet toxische nodular goitre).

Waarschuwingen

Er bestaat een kans op wisselwerking met lithium wat kan leiden tot een verhoogde kans op hypothyreoïdie. IODOSORB Dressing mag niet gecombineerd worden met kwikhoudende antiseptica of taurolidine. Indien de patiënt op korte termijn nieronderzoeken moet ondergaan, dient de arts geïnformeerd te worden.

Voorzorgsmaatregelen

- De inhoud van de verpakking mag slechts voor één patiënt gebruikt worden.
- IODOSORB Dressing niet aanbrengen rond ogen, oren, neus of mond.
- Het product is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.
- IODOSORB Dressing kan het eerste uur na aanbrengen een lichte, voorbijgaande pijn veroorzaken. Dit duidt erop dat de reiniging van de wond begonnen is. Soms kan de huid rond de wond opzwellen of rood worden door gebruik van IODOSORB Dressing. Dit gaat meestal vanzelf over. Indien de symptomen niet overgaan of indien de patiënt andere symptomen krijgt, dient contact opgenomen te worden met de behandelaar.
- Contact met de huid rond de wond/onbeschadigde huid dient zoveel mogelijk vermeden te worden.
- Het is mogelijk dat zich een korst vormt als IODOSORB Dressing uitdroogt.
- Niet meer dan 50 g (5 sachets van 10 gr.) per keer aanbrengen en niet meer dan 150 g per week (gelijk aan 15 sachets van 10 gr.)
- De behandeling mag niet langer dan 3 maanden duren.

Gebruiksaanwijzing

IODOSORB Dressing aanbrengen

1. Was uw handen zorgvuldig voor en na gebruik en draag handschoenen. Reinig de wond en de omringende huid met licht stromend water of een zoutoplossing. Droog het wondoppervlak NIET af.
2. Verwijder het gaas aan beide zijden van de substantie.
3. Snijd of kneed het verband in de juiste vorm voor de wond. Bedek de wond geheel met een geschikt secundair verband. Zo nodig compressieverband aanbrengen. Eventueel resterend IODOSORB Dressing weggooien omdat dit niet meer steriel is.

IODOSORB Dressing verwisselen

1. IODOSORB Dressing moet verwisseld worden als het verzadigd is met wondvocht en alle jodium is vrijgekomen. Dit is te zien aan kleurverlies van het verband en gebeurt meestal twee tot drie keer per week. Bij zeer veel exsudaat uit de wond kan dagelijkse verbandwisseling nodig zijn.
2. Het verband zo nodig een paar minuten laten weken en dan verwijderen.
3. IODOSORB Dressing voorzichtig verwijderen met stromend water of een zoutoplossing.
4. Overtollig vocht voorzichtig opdeppen. Het wondoppervlak moet nog enigszins vochtig zijn wanneer een nieuw IODOSORB Dressing wordt aangebracht.

Beschikbaarheid product

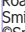
Artikelnummer

66001290 5 x 5g

66001291 3 x 10g

66001292 5 x 10g

66001293 2 x 17g

 Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. *Trademark van Smith & Nephew. Geproduceerd in Zweden.

©Smith & Nephew Aanmaakdatum 04/2017

www.smith-nephew.com www.iodosorb.com