

IODOSORB[®] OINTMENT

Cadexomeer zalf met iodine

STERILE A

Aseptisch verwerkt.

Uitsluitend voor éénmalig gebruik. Inhoud niet gebruiken indien de verpakking geopend of beschadigd is of na de op de verpakking gedrukte vervaldatum. Op een droge plaats bewaren (<25°C).

Omschrijving

IODOSORB Ointment is een steriele, donkerbruine zalf die bestaat uit cadexomeer (kleine korrels van gemodificeerd zetmeel), polyethyleenglycol, poloxameer en jodium. De cadexomeerkorrels zijn biologisch afbreekbaar. IODOSORB Ointment verwijdert overtollig exsudaat en afgestorven weefsel uit de wond en beperkt het aantal bacteriën aan het wondoppervlak. Daarbij vormt het een zachte, vochtige gel.

Indicaties

IODOSORB Ointment is geschikt voor de plaatselijke behandeling van chronisch exsuderende wonden. IODOSORB Ointment kan gebruikt worden bij compressietherapie. IODOSORB Ointment mag gebruikt worden op geïnfecteerde wonden. Raadpleeg uw lokale klinische protocol voor de behandeling van geïnfecteerde wonden.

Contra-indicaties

IODOSORB Ointment mag niet gebruikt worden op droog necrotisch weefsel of bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor jodium of één van de andere bestanddelen van het product. IODOSORB Ointment mag niet gebruikt worden door kinderen van 14 jaar of jonger, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of mensen met schildklieraandoeningen of een verstoorde nierfunctie (bijv. Hashimoto's thyroïditis of niet toxische nodular goitre). Indien de op patiënt op korte termijn nieronderzoeken moet ondergaan, dient de arts geïnformeerd te worden.

Waarschuwingen

Er bestaat een kans op wisselwerking met lithium wat kan leiden tot een verhoogde kans op hypothyreoïdie. IODOSORB Ointment mag niet gecombineerd worden met kwikhoudende antiseptica of taurolidine.

Voorzorgsmaatregelen

- De inhoud van de verpakking mag slechts voor één patiënt gebruikt worden.
- IODOSORB Ointment niet aanbrengen rond ogen, oren, neus of mond.
- Het product is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.
- IODOSORB Ointment kan het eerste uur na aanbrengen een lichte, voorbijgaande pijn veroorzaken. Dat duidt erop dat de reiniging van de wond begonnen is. Soms kan de huid rond de wond opzwellen of rood worden door gebruik van IODOSORB Ointment. Dit gaat meestal vanzelf over. Indien de symptomen niet overgaan of indien de patiënt andere symptomen krijgt, dient contact opgenomen te worden met de behandelaar.
- Contact met de huid rond de wond/onbeschadigde huid dient zoveel mogelijk vermeden te worden.
- Het is mogelijk dat zich een korst vormt als IODOSORB Ointment uitdroogt.
- Niet meer dan 50 g (5 tubes van 10 gr.) per keer aanbrengen en niet meer dan 150 g (gelijk aan 15 tubes van 10 gr.) per week.
- De behandeling mag niet langer dan 3 maanden duren.

Gebruiksaanwijzing

IODOSORB Ointment aanbrengen

1. Was uw handen zorgvuldig voor en na gebruik en draag handschoenen. Reinig de wond en de omringende huid met licht stromend water of een zoutoplossing. Droog het wondoppervlak NIET af.
2. Breng voldoende IODOSORB Ointment op een steriel verband aan om een 3 mm dikke laag te vormen in de vorm van de wond. Plaats het verband met de IODOSORB Ointment naar beneden op de wond. U kunt ook een 3 mm dikke laag IODOSORB Ointment direct op de hele wond aanbrengen en gladstrijken met een vinger in een handschoen.
3. Bedek de wond geheel met een geschikt secundair verband.
4. Zo nodig compressieverband aanbrengen. Na het aanbrengen dient de resterende inhoud van de tube weggegooid te worden omdat dit niet langer steriel is.

IODOSORB Ointment vernieuwen

1. IODOSORB Ointment moet vernieuwd worden, als het verzadigd is met wondvocht en alle jodium is vrijgekomen. Dit is te zien aan kleurverlies van de zalf en gebeurt meestal twee tot drie keer per week. Bij zeer veel exsudaat uit de wond kan dagelijkse vernieuwing nodig zijn. Het verband zo nodig een paar minuten laten weken en dan verwijderen.
2. IODOSORB Ointment voorzichtig verwijderen met stromend water of een zoutoplossing.
3. Overtollig vocht voorzichtig opdeppen. Het wondoppervlak moet nog enigszins vochtig zijn, wanneer nieuwe IODOSORB Ointment wordt aangebracht.

Beschikbaarheid product

Artikelnummer

66001297 2 x 20 g

66001298 4 x 10 g

66001299 1 x 40 g

 Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England. *Trademark van Smith & Nephew. Geproduceerd in Zweden.

©Smith & Nephew Aanmaakdatum 04/2017
www.smith-nephew.com www.iodosorb.com