




Super MultiVac™ 50

Coblation® Elektroden

Einrichten des Systems

- Schritt 1** Verbinden Sie das Steuergerät über das Netzkabel mit einer Steckdose.
- Schritt 2** Verbinden Sie den Fußschalter, falls vorhanden, mit dem Steuergerät.
- Schritt 3** Stellen Sie den Netzschalter am Steuergerät auf "ON" (I).
- Schritt 4** Verbinden Sie die Saugleitung mit einer medizinischen Standardabsaugeinrichtung.
Der empfohlene Absaugdruck liegt bei 200 bis 400 mmHg.
- Schritt 5** Verbinden Sie die Coblation-Elektrode mit dem Steuergerät. Die Standardeinstellung des Steuergeräts ist 7.

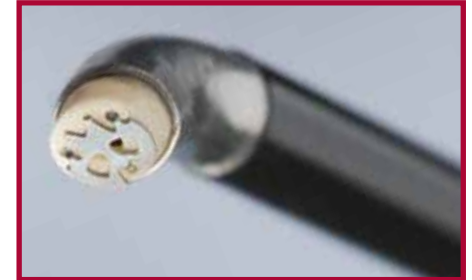

Tipps zur Operationstechnik

- Führen Sie die Elektrode erst nach der Aktivierung mit leichtem Kontakt an das Zielgewebe.
- Halten Sie die aktivierte Elektrode immer in Bewegung.
- Geschwindigkeit und Tiefe der Ablation hängen von den Einstellungen, dem Druck auf das Gewebe und der Geschwindigkeit, mit der die Elektrode über das Zielgewebe geführt wird, ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Spitze komplett von Spülflüssigkeit bedeckt ist, wenn Sie sie aktivieren.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen

- Es sollten immer Backup-Elektroden zur Verfügung stehen, um jegliche Verzögerungen vor oder während der Operation zu vermeiden.
- *Die Coblation-Elektrode Super MultiVac 50 ist für einen Einsatz von bis zu fünf Minuten bei kumulativer, aktiver Ablation mit einer Standardeinstellung von 7 vorgesehen. Übermäßiger Einsatz und/oder Einstellungen über den Standardwerten können die Lebensdauer der Elektrode verkürzen. Einstellungen unterhalb des Standardwerts können zu thermischen Verletzungen führen.
- Übermäßiger Verschleiß oder Schäden an der Elektrode durch die intensiven Behandlung von sehr dichten oder knöchigen Oberflächen können die Leistung der Elektrode beeinträchtigen und zu Verletzungen des Patienten führen. Es wird empfohlen, Elektroden regelmäßig zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass diese nicht beschädigt sind und ordnungsgemäß funktionieren. Verwenden Sie beschädigte Elektroden nicht weiter und überprüfen Sie die Gelenkflächen durch geeignete Maßnahmen.



Abschalten des Systems

- Schritt 1** Stellen Sie den Netzschalter am Steuergerät auf "OFF" (0).
- Schritt 2** Trennen Sie die Saugleitung ab.
- Schritt 3** Trennen Sie das Verbindungskabel der Elektrode vom Steuergerät ab.
- Schritt 4** Entsorgen Sie die benutzte Elektrode.

Coblation Elektrode	Ambient™ Super MultiVac 50 IFS	Super MultiVac 50 IFS	Super MultiVac 50
Bestellnummer	ASHA4830-01	ASH4830-01	ASC4830-01
Steuergerät	NUR Quantum™ 2 System	Quantum und Quantum 2 System	Atlas™ und Quantum Systems
Empfohlene Einstellung zur Ablation*	7	7	7
Durchmesser der Spitze	3.0 mm	3.0 mm	3.0 mm
Schaftdurchmesser	3.75 mm	3.75 mm	3.75 mm
Temperaturgenauigkeit	+/- 3° C	n/a	n/a

* Die Coblation-Elektrode Super MultiVac 50 ist für einen Einsatz von bis zu fünf Minuten bei kumulativer, aktiver Ablation mit einer Standardeinstellung von 7 vorgesehen. Übermäßiger Einsatz und/oder Einstellungen über den Standardwerten können die Lebensdauer der Elektrode verkürzen. Einstellungen unterhalb des Standardwerts können zu thermischen Verletzungen führen.



arthrocare.com/international

Corporate Headquarters

7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735
Main Phone: +1.512.391.3900
Order Entry: +1.800.797.6520
Order Entry Fax: +1.888.994.2782

EMEA Headquarters

St. James Business Park
9, Grimbald Crag Court
Knaresborough
North Yorkshire HG5 8QB
Phone: +44 (0) 1423 888806
Fax: +44 (0) 1423 888816

Asia Pacific Headquarters

Unit A, 10th Floor, Tower B
Gateway Plaza
No. 18 Xia Guang Li
East Third Ring North Road
Chao Yang District
Beijing, 100027, China
Phone: +852 3793 3430 32
Fax: +86 10 5829 9626

Deutschland

ArthroCare (Deutschland) AG
Berghäuser Str. 62
42859 Remscheid
Deutschland
Tel. +49 2191 93342 0
Fax +49 2191 93342 49

Österreich

ArthroCare Austria AG
Eduard-Bodem-Gasse 2
6020 Innsbruck
Österreich
Tel. +43 512 361 538
Fax +43 512 361 538-60

Schweiz

ArthroCare Switzerland
Gewerbstrasse 2
4528 Zuchwil
Schweiz
Tel. +41 32 686 88 99
Fax +41 32 686 88 90

Not for Distribution in the United States.

© 2013 ArthroCare Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle hier genannten Marken, Dienstleistungsmarken und Logos sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken der ArthroCare Corporation, verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften oder einer dritten Partei, die ihre Marken an ArthroCare lizenziert hat.