


INSTRUÇÕES DE USO

IODOSORB®

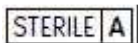

Processado asépticamente. Para uso único. Não utilize caso o tubo esteja aberto ou danificado, ou após o prazo de validade impresso na embalagem. Guarde em lugar seco (<25° C).

DESCRIÇÃO

IODOSORB® é um curativo em forma de pomada castanho-escuro estéril, composto por cadexômero (microgrânulos de amido modificado), polietilenoglicol, poloxâmico e iodo. Os grânulos de cadexômero são biodegradáveis. *IODOSORB®* remove o excesso de exsudato e fibrina na base da ferida e reduz a contaminação bacteriana na sua superfície. Ao fazer isso, a pomada transforma-se em um gel úmido e suave.

Código do Produto	Tubo
66001297	2x20g
66001298	4x10g
66001299	1x40g

INDICAÇÕES

IODOSORB® é indicado no tratamento tópico de feridas exsudativas crônicas. *IODOSORB®* pode ser usado sob terapia de compressão. *IODOSORB®* pode ser utilizado em feridas infectadas. Sempre que o produto seja utilizado em feridas infectadas, a infecção deverá ser inspecionada e tratada de acordo com os protocolos clínicos locais.

CONTRA-INDICAÇÕES

IODOSORB® não deverá ser usado em tecidos necróticos secos ou em doentes com sensibilidade conhecida ao iodo ou a qualquer um dos seus componentes. Não utilize *IODOSORB®* em crianças, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, nem em pessoas que sofram de insuficiência renal ou com distúrbios da tireóide (ex: tireoidite de Hashimoto ou bócio nodular não-tóxico).

ADVERTÊNCIAS

- Há um risco potencial de interação com lítio, resultando numa maior possibilidade de desenvolvimento de hipotireoidismo.
- Não utilize *IODOSORB®* concomitantemente com antissépticos mercuriais ou taurolidina.
- O doente deverá informar o seu médico se for realizar testes funcionais da tireóide.

PRECAUÇÕES

- O conteúdo do tubo deve ser utilizado somente em um único doente
- Não utilize *IODOSORB®* nas proximidades dos olhos, ouvidos, nariz ou boca
- O produto é indicado somente para uso externo
- *IODOSORB®* pode causar uma leve dor passageira, principalmente durante a primeira hora após aplicação. Isso é sinal de que o produto está começando a limpar a lesão. Ocasionalmente, *IODOSORB®* pode causar inchaço ou vermelhidão na pele ao redor da lesão. Esta reação é

normalmente transitória. Se estes sintomas persistirem ou se o doente registrar quaisquer outros sintomas, deverá entrar em contato o médico ou enfermeiro

- O contato com a pele imediatamente em volta da ferida e com a pele intacta deve ser minimizado
- É possível que se forme uma crosta aderente caso se permita que o **IODOSORB®** resseque
- Uma única aplicação de **IODOSORB®** não deve exceder 50g (equivalente a 5 tubos de 10g) e o máximo a aplicar por semana são 150g (equivalente a 15 tubos de 10g)
- A duração do tratamento não deve exceder 3 meses.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicando Iodosorb



1. Lave cuidadosamente as mãos antes e depois de usar. Usando luvas, limpe a lesão e a área em volta, irrigando gentilmente com água ou soro fisiológico. **NÃO SEQUE** a superfície da lesão.



2. Aplique uma quantidade suficiente de **IODOSORB** em um curativo estéril de modo a obter uma camada de 3mm de espessura do tamanho e formato da lesão. Posicione o curativo coberto por **IODOSORB** sobre a lesão. Alternativamente, aplique **IODOSORB** diretamente sobre a ferida, moldando com o dedo protegido por luva ao tamanho da lesão e com espessura de 3 mm.



3. Cubra completamente a lesão com um curativo secundário adequado. Com delicadeza pressione o curativo com os dedos enluvados para espalhar o produto.



4. Quando necessário, aplique bandagens de compressão. Após aplicação, o restante do conteúdo do tubo deve ser descartado.

TROCA DE IODOSORB

1. **IODOSORB®** deve ser trocado quando se apresentar saturado de fluídos da lesão e todo iodo tiver sido liberado. Isso é indicado pela perda de cor e em geral ocorre duas a três vezes por semana. Trocas diárias podem ser necessárias caso a lesão libere grandes quantidades de exsudato. Caso necessário, umedeça o curativo por alguns minutos, antes de proceder à remoção.

2. Remova **IODOSORB®** gentilmente, irrigando com água ou soro fisiológico.
3. Seque o excesso de fluido gentilmente, deixando a superfície da lesão levemente úmida antes de reaplicar **IODOSORB®**.

As instruções de uso poderão ser obtidas através do site www.smith-nephew.com/brasil ou o formato impresso pode ser solicitado sem custo adicional, através do e-mail: sac.brasil@smith-nephew.com

**PRODUTO ESTÉRIL POR IRRADIAÇÃO
USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR**

Lote nº / Data de Esterilização / Data de Vencimento: Vide rótulo
Registro ANVISA nº: **80804050029**
Responsável Técnico: Andrea Rodrigues de Mello Santos- CRF-SP 49959

FABRICADO POR:

Smith & Nephew Medical Ltd.
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN – Inglaterra

DISTRIBUIDOR:

Smith & Nephew Medical Limited
101 Hessle Road
Hull. HU3 2BN
Inglaterra

IMPORTADO/DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:

SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Avenida Presidente Tancredo Neves, 272 - Jardim Floresta
CEP: 06730-000 – Vargem Grande Paulista/SP
CNPJ: 13.656.820/0001-88
Tel.: 11 2093-0723 Fax: 11 2093-0723
Responsável Técnico: Andrea Rodrigues de Mello Santos- CRF-SP 49959

(®) Marcas Registradas de Smith & Nephew