

Help patiënten zich
goed in hun vel te
voelen, zelfs als deze is
aangetast.



 smith&nephew
ALLEVYN[®]
Non-Adhesive



ALLEVYN® Non-Adhesive heeft een drielaagse structuur, bestaande uit een niet klevende wondcontactlaag³, een zachte en sterk absorberende foam² en een ademende toplaag¹. Zo wordt comfort voor de patiënt⁴ gecombineerd met effectieve vochtbeheersing^{1,2}.



- Zeer goed ademende toplaag¹ helpt het risico op maceratie van de wond en de huid eromheen tot een minimum te beperken⁵
- Niet klevende wondcontactlaag maakt het wondverband geschikt voor gebruik op tere en gevoelige huid^{3,4} zoals bij epidermolysis bullosa
- Zacht en comfortabel voor de patiënt⁴ en vervormbaar voor lastig te verbinden lichaamsdelen^{2,4}
- Specifiek komvormig hielverband dat speciaal is ontworpen voor dit lastig te verbinden gebied
- In een groot aantal maten beschikbaar. Alle versies kunnen worden bijgeknipt voor gebruik op afwijkende lichaamscontouren
- Geschikt voor gebruik onder compressietherapie⁷
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen²
- Speciale vorm ontwikkeld voor tracheostomie

Indicaties

Oppervlakkige, granulerende wonden, chronische en acute exsuderende wonden, oppervlakkige tot diepe wonden zoals decubitus, beenulcera en diabetische voetulcera, geïnfecteerde wonden, maligne wonden, incisies, eerste- en tweedegraads brandwonden, donorplaatsen, ulcera met een schimmelinfectie, oncologische wonden en epidermolysis bullosa.

Aanbrengen


Maak de wond schoon in overeenstemming met lokale klinische protocollen. Kies een geschikte maat wondverband. Prepareer en reinig de huid rondom de wond en verwijder overtollig vocht. Overtollig haar moet worden weggeknipt om ervoor te zorgen dat het wondverband zo dicht mogelijk op de wond wordt aangebracht. Haal ALLEVYN Non-Adhesive met een schone techniek uit de verpakking. Breng de witte kant aan op de wond en zorg daarbij voor goed contact. Maak het wondverband vast met een fixatiemiddel (bijv. OPSITE® Flexifix of OPSITE Flexifix Gentle), tape of wondverband. ALLEVYN Non-Adhesive kan worden bijgeknipt om het wondverband passend te maken voor gebruik op een lastige plaats. Gebruik altijd een schone techniek om het wondverband bij te knippen. Bij gebruik onder compressietherapie moet het wondverband op maat worden geknipt van de wond. Als het verband is bijgeknipt, zorg dan dat blootgestelde randen van het schuimverband afgeplakt worden met een folie, waarbij gezorgd moet worden dat niet het gehele verband bedekt wordt.

Frequentie van verbandwisseling

Tijdens de eerste stadia van de wondgenezing moet ALLEVYN Non-Adhesive worden geïnspecteerd volgens het lokale klinische protocol. Wondverbanden kunnen maximaal 7 dagen blijven zitten, of (als dit eerder is) totdat er wondvocht zichtbaar is binnen 1,5 cm van de rand van het wondverband. Als er wondverbanden worden aangebracht in het sacrale gebied, kunnen deze maximaal 5 dagen blijven zitten. Vanwege de grotere kans op besmetting en ontsteking in dit gebied kan het echter nodig zijn om extra te controleren op wondverkleving, afhankelijk van de lokale klinische protocollen. De beslissing over wanneer het wondverband moet worden verwisseld, moet worden genomen op basis van klinische beoordeling. Tevens moeten lokale protocollen in acht worden genomen.

Referenties

1. Smith & Nephew data on file report: Comparison of the permeability of ALLEVYN Non-Adhesive standard and new ALLEVYN Non-Adhesive written by David Foster and Anna Rial, Feb 2006. 2. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. Kurring PA et al., (1994). Br J Nurs 3(20) 1049-1053. 3. A randomised comparative pilot study to evaluate ALLEVYN hydrocellular dressings and Sorbsan Calcium alginate dressings in the treatment of diabetic foot ulcers, Baker NR, Creevy J. Presented at the 6th Annual Symposium on Advanced Wound Care, San Diego, California, 1993. 4. Clinical evaluation report ref: CE/022/ANA – A prospective user evaluation on the effect of process changes tot eh manufacture of ALLEVYN Non-Adhesive wound dressings. Samantha Hartwell, November 2006. 5. The clinical and physical properties of ALLEVYN Non-Adhesive dressings and the moist wound environment. 6. Denyer J. Wound Management for children with Epidermolysis Bullosa. Dermatol Clin. 28(2): 257-64, 2010. 7. Smith & Nephew data on file 0512009.

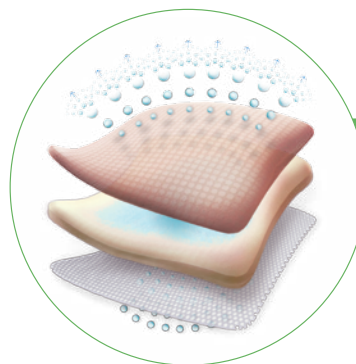


Ademende toplaag¹

Hydrocellulaire foamlag²

Niet klevende³ wondcontactlaag

Voorzorgsmaatregelen

ALLEVYN Non-Adhesive kompressen mogen niet opnieuw gebruikt worden. Gebruik ALLEVYN Non-Adhesive kompressen niet met oxiderende producten zoals hypochloride oplossingen (b.v. EUSOL) of waterstofperoxide want deze producten kunnen het absorberende polyurethane bestanddeel van het kompres afbreken. Wanneer roodheid of gevoeligheid van de huid optreedt, dient u het gebruik van ALLEVYN Non-Adhesive te staken en contact op te nemen met uw zorgverlener. ALLEVYN Heel mag niet zonder drukverlichtende hulpmiddelen worden gebruikt voor verlichting van de druk. ALLEVYN Non-Adhesive is een product voor eenmalig gebruik. Wanneer het product op meer dan 1 patiënt wordt gebruikt is er kans op kruisbesmetting of infectie. Het openen van de verpakking verbreekt de steriliteit van het product. Geopende verpakkingen met niet gebruikte wondverbanden dienen niet te worden bewaard voor later gebruik.

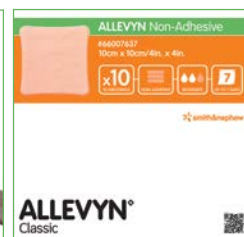

Afmeting	Verpakking	ZI-nummer	Bestelnummer
5 x 5 cm	10	14129728	66007643
10 x 10 cm	10	13260278	66007637
10 x 20 cm	10	13803093	66007335
15 x 15 cm	10	14845911	66000093
20 x 20 cm	10	13260294	66007638
40 x 70 cm	2	14341220	66000663
Heel (10,5 x 13,5 cm)	5	14221462	66007630
Tracheostomy (9 x 9 cm)	10	13607898	66007640

Al meer dan 150 jaar ondersteunen wij professionals in de zorg

Wondverzorging

Smith & Nephew Nederland C.V.
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp
T 020-654 39 99

www.smith-nephew.nl
® Handelsmerk van Smith & Nephew
NL-NL-05-16-208