


Beknopte gebruikershandleiding

(Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over RENASYS TOUCH)

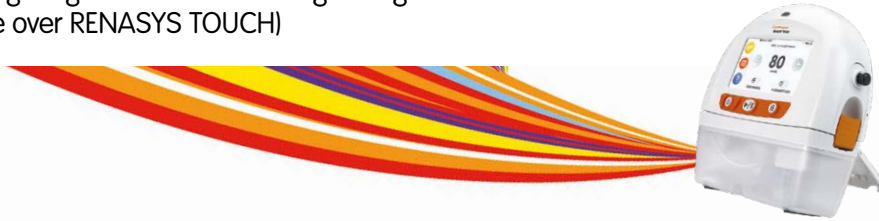

1. Schakelen tussen continue en intermitterende therapie

- Pauzeer de therapie en druk in het startscherm op de wisselknop voor therapiemodus om te schakelen tussen continue en intermitterende therapie




2. Therapie starten (continu)

Stap 1: zorg ervoor dat de unit is ingeschakeld en dat het startscherm voor continue therapie wordt weergegeven

Stap 2: gebruik de knop + of - om de voorgeschreven druk in te stellen

Stap 3: druk op de startknop om therapie toe te dienen

Wanneer therapie actief is, brandt de statusindicator boven op de unit groen en draait de oranje therapie-indicator boven in het scherm

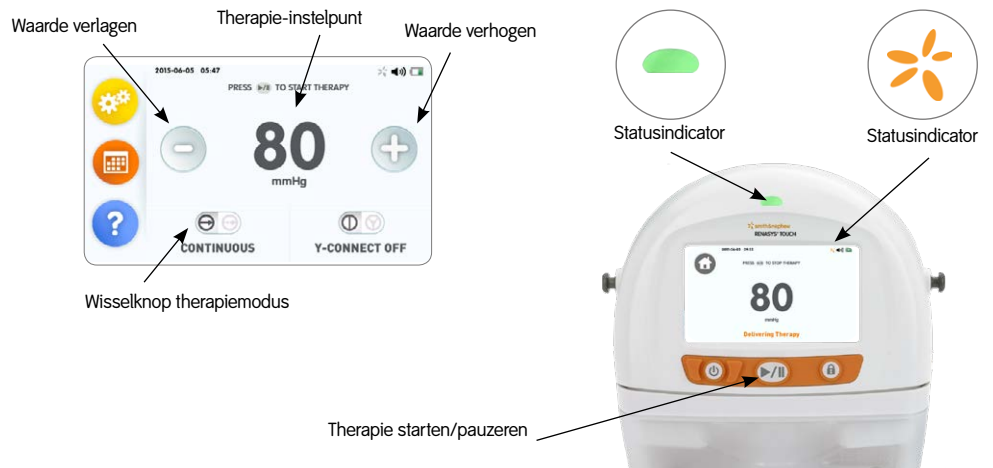

3. Intermitterende therapie starten

Stap 1: zorg ervoor dat de unit is ingeschakeld en dat het startscherm voor intermitterende therapie wordt weergegeven

Stap 2: wijzig de instellingen voor hoge en lage druk en de cyclustijden door de gewenste instelling te selecteren en met de knop + of - de voorgeschreven druk/tijd in te stellen

Stap 3: druk op de startknop om therapie toe te dienen

Wanneer therapie actief is, brandt de statusindicator boven op de unit groen en draait de oranje therapie-indicator boven in het scherm



Alle vier de instellingen kunnen worden aangepast binnen het volgende drukbereik:

Therapie met hoog niveau

25, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mmHg

Cyclustijd voor hoog niveau: 3, 5, 8, 10 minuten

Therapie met laag niveau

0, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 mmHg

Cyclustijd voor laag niveau: 2, 3, 5, 8, 10 minuten



4. Afdichting controleren

Volg de instructies op het scherm om de afdichting te controleren. Zodra er sprake is van afdichting, wordt op het scherm 'Seal achieved' (Afgedicht) weergegeven, gevolgd door 'Delivering therapy' (Therapie toedienen)

Kijk naar een 'rozijnachtig' uiterlijk

Luister naar een 'sissend' geluid dat een lek aanduidt


Voel aan het wondverband; dit moet hard aanvoelen

Mogelijke locatie van lek

- Rimpel of vouw
- Huidplooi of -groef
- Waar een drain uit de folie komt (indien van toepassing)

Interventie

Dicht rimpels of vouwen af met extra folie. Breng pasta aan rondom de drain (bij gebruik van een RENASYS°-drain)

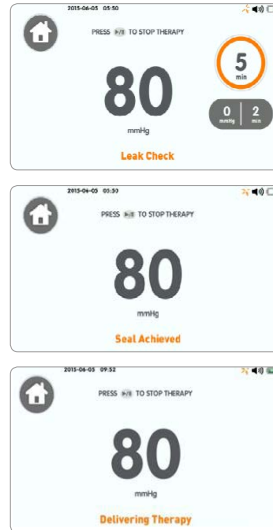

5. Het scherm vergrendelen

Met de vergrendelfunctie worden het aanraakscherm en de start/pauze-knop vergrendeld. De aan/uit-knop wordt niet vergrendeld. De statusindicator blijft groen branden om aan te geven dat de unit nog steeds therapie toedient.



Bij het toedienen van therapie wordt het scherm donker. Druk op de start- of vergrendelknop om het scherm weer te activeren.

Als er een alarm afgaat, wordt de unit automatisch ontgrendeld en wordt het alarmscherm weergegeven.

De unit wordt automatisch vergrendeld en in de slaapstand gezet na 5 minuten zonder gebruikersactiviteit.

6. Schakelen tussen patiënt- en zorgverlenermodus

Stap 1: druk op de gele instellingenknop om het instellingenscherf te openen



Stap 2: druk in het menu op de optie (Modus wijzigen)



Stap 3: selecteer de gewenste modus (Zorgverlener) of (Patiënt)



Stap 4: voer het wachtwoord in (3141) en druk op het groene vinkje om van modus te wisselen



Stap 5: druk twee keer op de gele knop op het scherm om terug te gaan naar het startscherm



Wondverzorging

Smith & Nephew Nederland C.V.
Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp
T 020-6543999

www.smith-nephew.nl
° Handelsmerk van Smith & Nephew
NL-NL-04-18-462

Al meer dan 150 jaar ondersteunen wij professionals in de zorg